



Gebruiksaanwijzing Bed-Alert (005666)

Montage

1 Maak de hoek rechtsonder op het linker hekwerk aan de te openen zijde van het hekwerk waarop u het "Bed-Alert" wilt bevestigen vast, doe dit ter grootte van de Bed-Alert.

2 Zet het bed in de gesloten toestand. Oefen het bevestigen van de Bed-Alert en magneetblokje even "droog" dus voordat u de folie van de tape haalt. De Bed-Alert mag niet onder en links naast het hekwerk uitsteken.

3 Haal nu de schutfolie van de dubbelzijdige tape aan de achterzijde van de Bed-Alert en magneetblokje en plak ze rustig op hun plaats. Het lampje en het drukknopje moeten naar beneden wijzen. Het magneetblokje komt rechts naast de Bed-Alert met de magneet zijde tegen de Bed-Alert.

4 Na het opplakken van de Bed-Alert trekt u het gele kunststof stripje wat aan de bovenzijde uitsteekt eruit. Hierdoor wordt het systeem automatisch bekrachtigd.

5 Controleer de Bed-Alert op zijn functies. De Bed-Alert is nu klaar voor gebruik.

Wij adviseren om de batterij eens per jaar te vervangen, de Bed-Alert geeft echter zelf ook een signaal wanneer dit nodig is. Bij vervanging draait u aan de voorzijde de 4 schroeven uit het doosje en vervangt u beide AAA batterijen en plaatst u de schroeven weer terug.

Zo werkt de Bed-Alert

Bij opening van het bed activeert het systeem (waarneembaar door knipperend signaal).

Na ca. 12 seconden geeft de Bed-Alert een kort piepsignaal en neemt het knipperend signaal in snelheid toe.

Na ca. 20 seconden begint een alarm op te komen, U hebt dan 2 opties:

- Optie 1: het bed sluiten, dan stopt het geluid.
- Optie 2: drukken op het zwarte "snooze" knopje, hiermee wordt het alarm met ca. 10 seconden uitgesteld, dit kan al direct na de eerste melding na 12 seconden.

Bed hierna nog steeds onafgesloten? Dan volgt een steeds indringender, onmisbaar geluidssignaal.

! Disclaimer

De Bed-Alert is slechts een hulpmiddel om u er op te attenderen een bed te sluiten, het blijft te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om het bed te sluiten en dit te controleren. Claims die door het niet goed functioneren van de Bed-Alert alsnog voor een ongeval/voorval zorgen worden dan ook niet geaccepteerd. De verantwoording ligt volledig bij de gebruiker.